

# OCUflash® blue

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

## Popis produktu

OCUflash blue očné roztokové kvapky sú izotonický výplachový roztok s prídavkom extraktu očianky rostkovej (Euphrasia rostkoviána). OCUflash blue očné roztokové kvapky neobsahujú konzervačné látky. Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške so špeciálnym uzáverom Novelia. Fľaška je označená etiketou, zabalená do papierovej škatuľky spolu s návodom na použitie. 1 ml roztoku obsahuje 30 kvapiek.

## Výplach očí

OCUflash blue očné roztokové kvapky sú očný roztok bez konzervačných látok určený na výplach dráždivých častíc alebo chemikálií z oka. Bez rady lekára môže byť použitý na jednoduchý krátkodobý výplach, ďalej na kvapkanie do očí a na obklady očí.

## Dezinfekčný účinok

Extrakt očianky rostkovej (Euphrasia rostkoviána) pôsobí v oku protizápalovo, dezinfekčne a adstringentne (sťahujúco). Tieto charakteristické vlastnosti očianky rostkovej sa už dlhodobo využívajú k upokojeniu očí, ako prevencia a podporná liečba neinfekčných zápalov mihalníc a spojoviek. Prípravok je vhodné použiť pri odstraňovaní kozmetických prípravkov z okolia očí (viečok a rias).

## Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Chlorid sodný 7 mg v 1 ml  
Pomocné látky: edétan disodný, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, polysorbát 80, očianková tinktúra, borax, hydroxid sodný, čistená voda.

**Pomocná látka so známym účinkom:** očianková tinktúra (Euphrasia rostkoviána) 2,0 mg v 1 ml (0,2 %).

## Nositelia kontaktných šošoviek:

OCUflash blue očné roztokové kvapky neobsahujú konzervačné látky, takže sú vhodné pre nositeľov kontaktných šošoviek a pre ľudí s citlivými očami.

## Účel určenia prípravku

OCUflash blue očné roztokové kvapky sú určené na vypláchnutie dráždivých častíc, chemikálií a cudzích teliesok z oka, na vyplachovanie oka v prípade poranenia povrchu oka a na kvapkanie do oka pri vystavení vplyvom prostredia (napr. znečistenie, práca s počítačom, klimatizácia), ako prevencia a doplnková symptomatická liečba neinfekčných zápalov očných viečok, spojoviek a chronických infekcií spojoviek

## Indikácie

Špecifické indikácie pre OCUflash blue očné roztokové kvapky sú:

1. výplach oka po tonometrii a gonioskopii
2. výplach oka po nosení tvrdých kontaktných šošoviek
3. výplach oka, odstránenie cudzích teliesok, prachu a chlóranej vody
4. odplavenie zvyškov fluoresceínových roztokov
5. vymývanie hlienových a hnisavých sekrétov
6. ako prvá pomoc po ľahkom poleptaní spojoviek a očí kyselinami a zásadami (vápnom, maltou), poranenia povrchu oka

7. ako podporný prostriedok pri niektorých, hlavne neinfekčných zápaloch spojoviek, chronických zápaloch spojoviek.

**Populácia pacientov a určení používateľa**  
OCUflash blue očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

## Obmedzenia

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa pohlavia, veku a/alebo hmotnosti používateľov. Vzhľadom na bezpečnosť prípravku, je možné ho podávať aj novorodencom, dojčatkám, tehotným ženám a dojčiacim matkám.

## Dávkovanie

### Výplach

Pri výplachu akéhokoľvek cudzieho telieska z oka aplikujte roztok až do doby odstránenia cudzorodej látky či cudzích teliesok, poprípade do vymiznutia ťažkostí.


### Neinfekčný zápal spojoviek

Kvapkajte 1-2 kvapky do dolného spojovkového vaku 1 až 4-krát denne.

## Poučenie pred aplikáciou

OCUflash blue očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka.

1. Umyte si ruky a pohodlne sa posadte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.

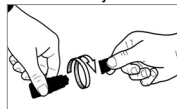


3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stlačení môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.



6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.
7. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala 1-2 kvapky prípadne väčšie množstvo roztoku pri výplachu. Potom uvoľnite spodné viečko a pomaly oko zatvorte, aby sa OCUflash blue rovnomerne rozmiestnil po očnému povrchu.

Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasať vzduch do plastovej fľašky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom.

Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.

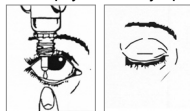

8. V prípade potreby postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľašku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.
10. Bezprostredne po použití nasadte pevne uzáver späť na fľašku. Fľaška sa uchováva v zvislej polohe.
- Pri zápaloch očných viečok sa roztok môže použiť aj na obklad.

#### Kontraindikácie

OCUflash blue očné roztokové kvapky sa nesmú používať pri precitlivenosti na niektorú z ich zložiek.



#### Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace.
- uchovávajúte mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



#### Upozornenie

##### Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

##### Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť nevráti opäť do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosť, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah jednej fľašky by mala používať iba jedna osoba.

#### Nežiaduce vedľajšie účinky

OCUflash blue očné roztokové kvapky sú

veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa po aplikácii môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako mierna vyrážka, exfoliatívna dermatitída (začervenanie a odlupovanie kože na veľkých častiach tela) alebo multiformný erytém (vyrážky rôznych foriem, ako napríklad červené flaky, vyvýšené pupienky alebo pľuzgiere)
- epitelové zmeny
- hyperémia (začervenanie)
- slzenie
- lokálne podráždenie (pálenie, svrbenie, štipanie, mierny nepríjemný pocit)

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s požívaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi ([neziaduceucinky@unimedpharma.sk](mailto:neziaduceucinky@unimedpharma.sk)) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

**Interakcie** nie sú doposiaľ známe.

#### Klinický prínos

OCUflash blue očné roztokové kvapky pomáhajú predchádzať podráždeniu, poškodeniu oka, zápalu alebo infekcii oka odplavením cudzorodých častíc, ako napríklad cudzie telieska, prach, roztok fluoresceínu alebo hlienové a hnisavé sekréty z povrchu oka, ktoré by inak mohli poškodiť oko a/alebo spôsobiť zápal alebo infekciu a zhoršenie stavu. OCUflash blue možno použiť aj ako doplnkovú symptomatickú liečbu neinfekčných zápalov očných viečok, spojoviek a chronických infekcií spojoviek.

#### Pokyny na skladovanie a likvidáciu produktu

Uchovávajúte pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávajúte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

#### Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s uzáverom Novelia so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

**Veľkosť balenia:** 1x10 ml

#### Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.  
Oriešková 11, 821 05 Bratislava  
Slovenská republika  
e-mail: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)  
[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)

#### Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025

CE 2265